

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODELU 6770



Masażer relaksacyjny plusOne Meno Glow

Konserwacja:

Opłucz urządzenie ciepłą wodą z mydłem przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od innych akcesoriów seksualnych. Akcesoria erotyczne wykonane z różnych materiałów mogą się wzajemnie uszkodzić w przypadku kontaktu.

Jakość:

Ten produkt jest wykonany z bezpiecznego silikonu, który jest nieszkodliwy dla ludzkiego ciała. Nie zawiera ftalanów, BPA ani lateksu

Ważne instrukcje:

Nie włączać podczas ładowania lub czyszczenia. Kontrolka będzie migać podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu kontrolka zaświeci się. **Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii:** lampka kontrolna będzie szybko migać, gdy bateria będzie prawie rozładowana. Należy używać wyłącznie zasilacza USB 5 V (standardowa ładowarka do telefonu komórkowego). Pełne naładowanie zostanie osiągnięte po około 90 minutach. Używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody. W pełni wodoodporny do zabawy w wannie i pod prysznicem

Ostrzeżenie:

Należy zaprzestać korzystania z produktu, jeśli nie odpowiada on użytkownikowi lub jego partnerowi. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody podczas ładowania.


Przycisk zasilania:

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Naciśnij mocno, aby przewinąć 10 ustawień. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Przyjmij zmiany i przejdź do następnego etapu życia z pewnością siebie i z pomocą urządzenia zaprojektowanego we współpracy z lekarzami. Masażer relaksacyjny Meno Glow firmy PlusOne zapewnia ulgę w objawach okresu okołomenopauzalnego i menopauzy. Ten zatwierdzony przez ginekologa masażer pomaga rozluźnić mięśnie i zwiększyć przepływ krwi dzięki dwóm silnikom, 10 konfigurowalnym ustawieniom wibracji i trybowi ogrzewania. Tryb ogrzewania i wibracje pomagają rozluźnić mięśnie, zwiększyć przepływ krwi i utrzymać aktywność pochwy.

Zapewnia delikatne wsparcie podczas menopauzy dzięki smukłemu i zakrzywionemu kształtowi, który można łatwo włożyć i zapewnić komfort. Jest odwracalny, z dwoma rozmiarami do wkładania i niezależnymi silnikami po każdej stronie, aby dostosować się do potrzeb ciała na każdym etapie. Zastąpujesz na to, by czuć się silną i pewną siebie w tym przejściowym okresie.

Jak korzystać z masażera Pleasure Beast Pulse Stimulator:

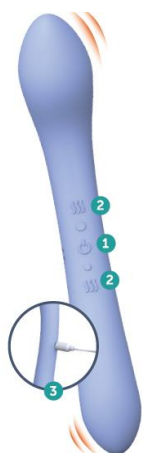

Przycisk zasilania - Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Naciśnij okrągłe przyciski powyżej i poniżej przycisku zasilania, aby przełączać się między 10 trybami wibracji na każdym końcu.

Przyciski ogrzewania - Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć. Dioda LED będzie pulsować, wskazując nagrzewanie, i będzie świecić światłem ciągłym, gdy urządzenie osiągnie pełną temperaturę.

Port ładowania - Podłącz magnetyczną głowicę ładującą do punktu styku w celu ładowania.




Pielęgnacja pochwy

Używaj tego urządzenia jako narzędzia do poszerzania kanału pochwy i zapobiegania suchości spowodowanej okresem menopauzy i menopauzy. Pamiętaj, aby używać osobistego lubrykantu.



Rozgrzewka

Technologia rozgrzewająca ogrzewa tuż powyżej temperatury ciała, zapewniając komfortowe uczucie i stymulując przepływ krwi.

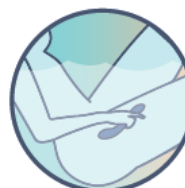

Stwórz relaksującą oazę

Wybierz idealny rozmiar i przełączaj się między różnymi trybami wibracji, aby uzyskać maksymalny relaks i satysfakcję.

Jak ładować



1. styk ładowania to mały metalowy pierścień znajdujący się na spodzie urządzenia



2. wyrównać magnetyczną głowicę ładującą ze stykiem.



3. kabel zostanie magnetycznie zatrzaśnięty na swoim miejscu. Dioda LED przycisku zasilania będzie powoli migać, sygnalizując ładowanie

Doświadcz intensywnej przyjemności i wybierz najlepszą stymulację wibracjami. Działa do 1,5 godziny po pełnym naładowaniu.

Rozmiar produktu: wymiary w centymetrach wynoszą: 5,08 cm × 7,62 cm × 12,7 cm.

Akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Jeśli to możliwe, należy poddać go recyklingowi. Użytkownikom nie wolno samodzielnie wyjmować ani wymieniać baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Opakowanie zawiera: masażer relaksacyjny plusOne Meno Glow, torbę do przechowywania, kabel do ładowania i instrukcję obsługi.